

パワースコープ 2

POWER SCOPE™ 2



取扱説明書

管理 認証番号 228AGBZX00075000

はじめに

パワースコープ2はチェアサイドで簡単に装着できるように一体型デザインを採用しており、ナットもあらかじめセットされています。



上顎第一大臼歯の近心側と下顎犬歯の遠心側にそれぞれナットを装着します。



マグネットスリーブについて

※マグネットスリーブは金属製のものに近づけないようにしてください。

- ① マグネットスリーブを金属製以外の平らな場所に置きます。このとき、円錐状のくぼみがある開口部を上を向いているようにしてください。
- ② 専用の六角ドライバーをスリーブの上で持ち、ドライバーの先端を開口部の中心に向けながら近づけてください。
- ③ 磁力によってマグネットスリーブがドライバーの先端にくっつきます。



マグネットスリーブ

装着方法

- ① パワースコープ2をワイヤーにはめ込む前に、スクリューの先端がナットより飛び出していないことを確認してください。(画像 A&B)
- ② ドライバーを上顎用のパワースコープ2のスクリューヘッドに当ててください。(画像 C)
- ③ ステンレスアーチワイヤーを装着した上顎第一大臼歯の近心側に、パワースコープ2を装着してください。(画像 D)

・推奨するワイヤーはステンレス製の .017×.025 (.018 スロット)、または .019×.025 (.022 スロット) です。推奨サイズより細いワイヤーを使用すると、本品が傾いてしまう場合があるため、推奨サイズ以上のものを使用してください。ナットに指を添えることで、スクリューを締める際に安定させることができます。



・右用は逆ねじ（左回しねじ）になっています。右用の装置はスクリューをゆるめるときの方向が矢印で示されています。

※ナットがパワースコープ2装着時にワイヤーを固定してしまうことはありません。ワイヤースペースに入った状態が正しいセット方法です。(画像 E)

- ④ 下顎は、ドライバーを用いて犬歯の遠心側に装着します。下顎のワイヤーの上に装着し、スクリューを締めてください。(画像 F)

・クリンパブルシムを併用することで、よりアクチベーションを強め、治療を進めることができます。(画像 G)

・クラスIIの度合いによって、また歯列弓のサイズによっては、始めからクリンパブルシムが必要となる場合があります。

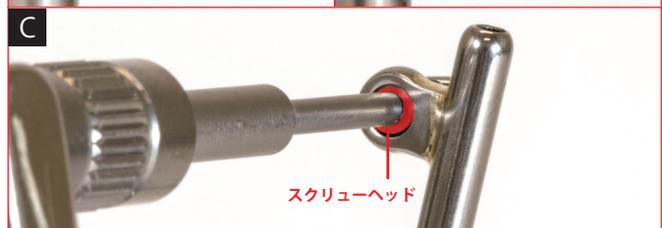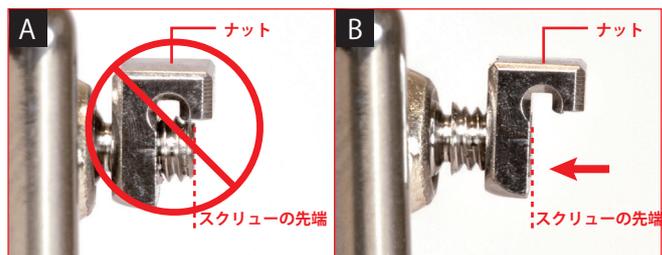


2mmの間隔で3本のアクチベーションインジケーターがあります。

Full (260gf) Partial (170gf) なし

ヒント

- ・下顎の中切歯・側切歯が傾斜しているときは、装置の使用によりさらに傾斜してしまうおそれがあるため、注意してください。
- ・下顎の歯列弓は、「下顎前歯の前方傾斜」と「犬歯の遠心側にスペースができること」を防ぐため、次のいずれかの方法により固定させてください。
 - ▶下顎アーチワイヤーのシンチバック
 - ▶下顎アーチ全体のエラスティックチェーン
 - ▶臼歯部ワイヤーにアーチロック・ストップ
- ・下顎前歯にはマイナストルクのブラケット（-6から-10）の装着をおすすめします。
- ・下顎犬歯に関しては、治療中のローテーションを防ぐためにステンレスのリガチャーを使用することをおすすめします。

装着位置

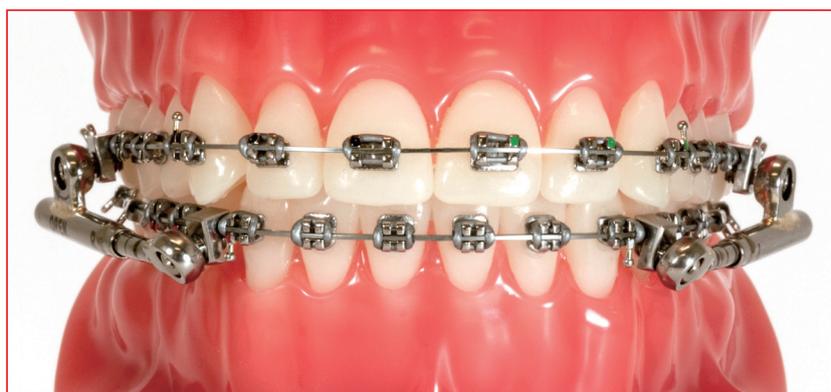

右側

左側



右用の装置には『R』のIDマークがあります。『OPEN』の文字と矢印の向きで、スクリューの回転方向を確認してください。（逆ねじ）



左用の装置には『L』のIDマークがあります。

取り外し方法

- ① まず下顎から、ナットがワイヤーから外れるまでスクリューをゆるめてください。
- ② 同様の方法で上顎のスクリューをゆるめてください。
- ③ 患者様の口腔内から装置を取り外してください。

本品の使用にあたっては添付文書もお読みください

第2版 2017年1月

製造販売

美しい歯ならびを創造する
株式会社バイオデント

東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル

☎ 0120-49-0980

TEL 03-5604-0980/FAX 03-3801-7560

URL <http://www.biodent.co.jp/> E-mail info@biodent.co.jp

AO AMERICAN
ORTHODONTICS

3524 Washington Avenue Sheboygan, Wisconsin, 53081-1048 USA
Email: info@americanortho.com web: www.americanortho.com