

再使用禁止

イントラオーラルフック

【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・ニッケル等の成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。*
- ・金属疲労等により破折することがある。また使用状況により脱落することがある。その際はただちに歯科医師の診断を受けさせること。

【使用目的又は効果】*

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。


【使用方法等】

- ①フックを矯正装置に取り付ける。
- ②取り付けたフックに、顎間ゴム、スプリング等を掛けて歯牙を移動させる。
- ③スペースを調節する必要があるときは、ストップを使用する。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は、次の原材料で構成する。
- ・ステンレス鋼

(構造等)

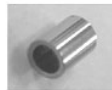

【使用上の注意】**

- 1)使用注意
 - ①歯ブラシ等が触れると脱落したり変形する可能性がある。本品に機械的な力を加えないよう、患者に指導すること。*
 - ②本品で粘膜を傷つけることのないよう、患者に説明しておくこと。*
 - ③万が一、製品が変形や変質をしている場合には、使用しないこと。
 - ④脱落・破折は誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかからせること。*
- 2)重要な基本的注意
 - ①ニッケル等の成分に対し、発疹・皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス